

Verwendungszweck und Indikation

Unsere Holzhandstöcke sind für Menschen mit leichter Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigung der Bewegung, Beeinträchtigung des Gleichgewichtes mit ausreichend erhaltener Gehfähigkeit und Beeinträchtigung der Koordination. Sie dienen dabei der Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens bzw. der teilweisen Entlastung einer unteren Extremität. Die Anwendung der Holzhandstöcke kann im Innen- und Außenbereich erfolgen. **Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!**

Kontraindikation

Die Verwendung von Holzhandstöcken ist ungeeignet bei Gliedmaßenverlust an beiden Armen oder Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden an beiden Armen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen, Beutel oder sonstige Gegenstände an den Handstock! Der Handstock darf **keinesfalls zweckentfremdet** werden, wie z.B. zum Hebeln oder Versetzen von Gegenständen oder als Schaltheilfe für Lichtschalter oder Fahrstuhlknöpfe! Die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt des Handstocks entscheidend! Vermeiden Sie feuchte Böden oder Untergründe wie Kies, Sand, Laub, Eis oder Schnee! **Achten Sie auf Stolperstellen** wie Unebenheiten, Löcher im Boden, lose Bodenbeläge oder Kanten, weil der Handstock dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann! Besondere Vorsicht ist bei ungenügenden Lichtverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht erkennbar sind!

Einstellen des Handstocks

Warnung! Für die funktionsgerechte und ergonomisch richtige Einstellung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler! Ein falsch eingestellter Handstock kann die Funktionsfähigkeit des Handstocks einschränken oder zur Über- oder Fehlbelastung des Patienten führen! Der Handstock wird Ihnen als Patient in einem ordnungsgemäßen Zustand übergeben und von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal individuell auf Ihren Körper eingestellt. Sollten Sie unsicher sein, ob dies der Fall ist, so wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal. Der Handstock kann Ihnen die erwünschte Entlastung nur bieten, wenn sie optimal an die Körpergröße angepasst ist.

Länge anpassen

Stellen Sie sich mit Ihren alltäglichen Straßenschuhen aufrecht hin und lassen Sie die Arme locker ausgestreckt und ganz leicht angewinkelt herunterhängen. Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern während des Gebrauchs des Gehstockes immer gerade zueinanderstehen und nicht schräg! Stellen Sie den Handstock mit dem Griff auf den Boden und messen Sie die Länge von der Handwurzel/Handgelenk bis zum Boden oder markieren die gewünschte Stelle mit einem leicht wieder lösbaren Stift. Anschließend wird der Gehstock auf Höhe des Handgelenknöchels gekürzt.

Benutzung

Die Benutzung des Handstocks kann sehr unterschiedlich sein und hängt von den individuellen Einschränkungen der Gehfähigkeit ab. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal in die Benutzung des Handstocks einweisen! Der Handstock darf nicht im Wasser benutzt werden. Dauerhafter Kontakt des Handstocks mit Feuchtigkeit ist zu vermeiden. Bei Feuchtigkeit ist der Handstock entsprechend zu trocknen. Die richtige Handhabung des Handstocks benötigt etwas Übung. Wir empfehlen, sich deshalb am Anfang durch eine Hilfsperson zusätzlich stützen zu lassen. Benutzen Sie den Handstock immer auf der Seite, die sich gegenüber des verletzten oder des zu schonenden Beins befindet! Führen Sie den Handstock nahe am Körper, nicht schräg nach außen! Sie könnten sonst stürzen! Umfassen Sie bei der Benutzung den Griff des Handstocks mit der Hand vollständig und fest! Setzen Sie den Handstock immer möglichst gerade auf den Boden auf, damit Sie nicht wegrutschen! Suchen Sie sich zum Sitzen Stühle mit Armlehnen. Sie können sich dann beim Aufstehen an den Armlehnen abstützen! Tragen Sie möglichst bequeme Schuhe mit flachen Absätzen, damit das Bein zusätzliche Belastung besser bewältigen kann! **Sollten Sie doch einmal stürzen:** Lassen Sie den Handstock möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf dem Handstock stürzen! Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer Hilfsperson begleiten und stützen, damit diese Sie bei einem eventuellen Fallen auffangen kann! Lassen Sie sich nach Möglichkeit durch Fachpersonal in das Treppensteigen mit einem Handstock einweisen! Beim Treppensteigen mit einem Handstock halten Sie sich bitte unbedingt mit der freien Hand am Geländer fest! Nehmen Sie beim Treppensteigen und Gebrauch von zwei Holzhandstöcken beide Holzhandstöcke zusammen in eine Hand und halten sich bitte unbedingt mit der freien Hand am Geländer fest!

Vorsichtsmaßnahme

Durch die Benutzung eines Handstocks entsteht eine für einzelne Körperpartien ungewohnt starke Belastung! Dadurch können folgende unerwünschte Nebenwirkungen auftreten: An den Händen können Druck- bzw. Scheuerstellen entstehen! Beachten Sie, dass dies zu Beginn oder bei längerer Belastung zu Schmerzen und Überanstrengung führen kann! Legen Sie genügend Pausen ein!

Lagerung und Pflege

Lagern Sie den Handstock niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Den Handstock nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze schädigen den Lack! Schützen Sie Ihren Handstock vor dem Umfallen und vor Lackschäden (z.B. durch Schlaufen oder Halter). **Der Gummipuffer ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden.** Der Handstock darf nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung nur nach vorheriger Prüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden!

Warnung! Den Griff und die Gummikapsel niemals mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! Reinigen Sie den Handstock bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie niemals Lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese den Lack beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben.

Verwendungseinschränkung

Der Handstock darf nur laut Herstellerangaben belastet werden. **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Körpergewicht!** Wenden Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler. Ein verbogener oder beschädigter Handstock darf keinesfalls weiterverwendet werden, da dieser keine erforderliche Stabilität mehr bietet! Wegen der Bruchgefahr darf ein verbogener Handstock auch nicht gerichtet werden! **Hinweis:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer des Handstocks ist begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung des Handstocks im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Igor Vlk-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Igor Vlk-súkromná firma das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

Artikelnummer	Länge	Durchmesser Holzhandstock	Max. Körpergewicht
Derby Bambus	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Derby braun	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Derby hell	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Derby schwarz	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Derby weiss	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Fritz braun	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Fritz hell	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Fritz schwarz	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg
Fritz weiss	96 cm	18 – 20 mm (konisch zulaufend)	100 kg



Ossenberg GmbH
 Kanalstraße 79
 48432 Rheine
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 59 71 - 9 80 46 0
 Fax: +49 (0) 59 71 - 9 80 46 16
 Internet: www.ossenberg.com
 Mail: info@ossenberg.com



Igor Vlk-súkromná firma
 Na papiereň 317/39
 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
 Slowakei

Telefon: 00421 911 717 966
 Mail: igor@igorvlk.sk

